


# ***Punzone One-RIC***

Rimuovi in semplicità e sicurezza il ricevitore dagli auricolari dotati di **One-RIC**.

*Il punzone One-RIC è ordinabile con il codice 1122  
(Confezione da 3 punzoni)*

*Video tutorial Punzone One-RIC*

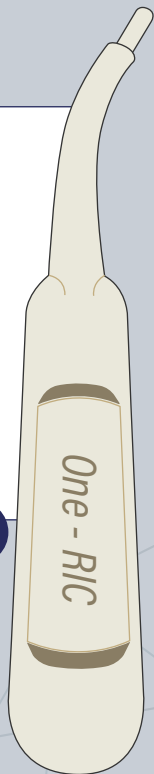

# ***Sistema One-RIC***



L'unico sistema che permette di utilizzare, sullo stesso auricolare, ricevitori di diversi brand e di diverse potenze.

*Applicato a tutti gli auricolari rigidi e acrilici con  
ricevitori compatibili*

*Info e video su One-RIC*





# Punzone One-RIC

SPECIFICHE



# Punzone One-RIC

ISTRUZIONI PER L'USO



## 1-2. RIMUOVI IL PARACERUME

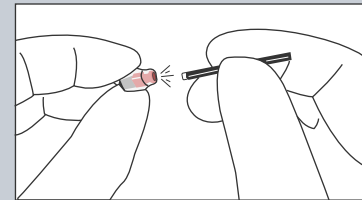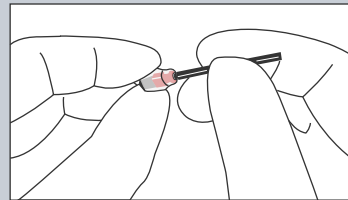

## 3-4. INSERISCI IL PUNZONE PER SBLOCCARE IL RICEVITORE

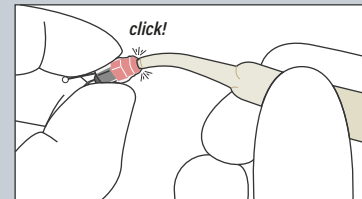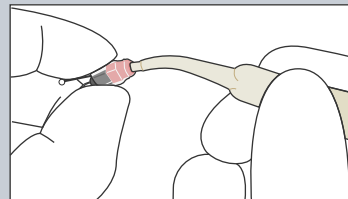

## 5-6. RIMUOVI IL RICEVITORE IN TUTTA SEMPLICITÀ

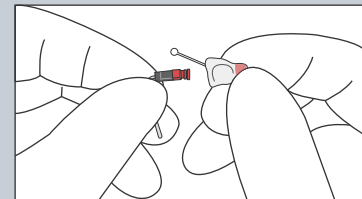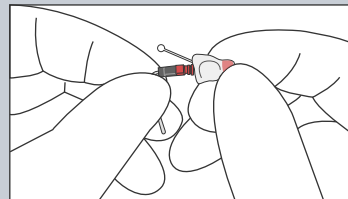

*Ricevitori applicabili sull'auricolare dotato di  
One-RIC*

<i>CRAI / Hansaton</i>	<i>4.0, 5.0, 6.0 (S, M, PW)</i>
<i>GN Resound</i>	<i>Legend ONE, SureFit 2 (LP, MP, HP) SureFit 3 (LP, MP, HP, M &amp; RIE)</i>
<i>Belton</i>	<i>S</i>
<i>Siemens Connexx</i>	<i>3.0 Metallo (S, M, HP)</i>
<i>Widex</i>	<i>Moment &amp; Easywear (S, M, HP) Tubetto sottile 0.9 - 1.4 - 5</i>
<i>Phonak</i>	<i>XP XS 4.0 (S, M, PW) 6.0 (S, M, PW)</i>
<i>Oticon / Bernafon</i>	<i>miniFit, miniFit Detect (60, 85, 100)</i>
<i>Starkey</i>	<i>RIC (40, 50, 60)</i>

Alloggiamento standard per paracerume HF4  
(alloggiamento per paracerume Prowax su richiesta)

Tutte le costruzioni sono fornite con preinstallato il  
paracerume QuickGuard (compatibile al 100% con HF4),  
di colore bianco.